



1. OBJET

Cette fiche d'instruction présente les tubes à utiliser en fonction des analyses demandées. Elle s'applique à l'ensemble des prélèvements sanguins réalisés, sous la responsabilité du laboratoire, au sein des établissements de soins.

2. DOMAINE D'APPLICATION ET RESPONSABILITÉS

Les prélèvements sont réalisés sous la responsabilité du biologiste et sont pratiqués par le personnel autorisé.

3. RÉFÉRENCES

- Fiches techniques des réactifs
- Catalogue produit BD Vacutainer
- Base documentaire Tubes BD Vacutainer : « EDTA en PET », « Glucose », « Citrate de Sodium en PET » et « SST II Advance »

4. MÉTHODOLOGIE

Le tableau ci-après précise le nombre et le type de tubes nécessaires à chaque analyse.

Lorsque le paramètre n'y figure pas, se référer au guide du laboratoire spécialisé.

5. CLASSEMENT ET ARCHIVAGE DES ENREGISTREMENTS ASSOCIÉS

Se référer à la procédure [MU-QUAL-PRG004 « Maîtrise des enregistrements relatifs à la qualité »](#).



RAPPEL : Ordre de prélèvement des tubes



 Réf 368861	NFS, Plaquettes	 Réf 368861	Electrophorèse de l'hémoglobine, HBA1C, Paludisme, Réticulocytes, VS
 Réf 368967	Biochimie – Immuno-enzymologie : Acide urique, ALAT (SGPT), Albuminémie, Amylase, ASAT (SGOT), BHCG, Bilan lipidique, Bilirubine, Calcium, Chlore, Cholestérol, CPK, Créatinine, CRP, Digoxine, Fer, GGT, HIV ^S , Hépatite B ^S (Ag HBs), Hépatite C ^S , Ionogramme, LDH, Lipase, Magnésium, PAL, Phosphore, Potassium, Protides, Réserve alcaline, Sodium, Transaminases, Triglycérides, Urée		
 Réf 368921	Glycémie, Lactates	 Réf 367374	Ammoniémie
 Réf 366164	BNP, Troponine Ic	 Réf 366164	Myoglobine, PTH
 Grand tube Réf 367864	Groupe sanguin (<i>carte de groupe avec double-détermination = deux prélèvements différents</i>), RAI (Agglutinines irrégulières)	 Réf 363048	Anticoagulants circulants, Antithrombine III, Facteurs de coagulation (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII) A remplir impérativement jusqu'au trait
<i>Si la prescription comporte des analyses à prélever sur tube réf. 363048 et sur tube CTAD, prélever uniquement le CTAD.</i>			
 Réf 363048	D-Dimères, Fibrine, TCA (<i>en absence de traitement hépariné</i>), TCK, TP A remplir impérativement jusqu'au trait	 CTAD Réf 367562	<i>En présence de traitement hépariné :</i> Anti-Xa, TCA A remplir impérativement jusqu'au trait
 Grand tube Réf 367955	Biochimie – Immuno-enzymologie : Ac anti-péroxydases, Ac anti-thyroglobuline, ACE ^S , AFP ^S , Apo A, Apo B, Bêta2-microglobuline, BW (TPHA) ^S , CA 125 ^S , CA 15-3 ^S , CA 19-9 ^S , Cortisol, S-DHEA, Facteur rhumatoïde, Ferritine, Folates sériques, Fructosamine, Haptoglobine, IgE totales, IgA, IgG, IgM, Préalbume, PSA L ^S , PSA ^S , Rubéole ^S , Sérologie CMV ^S , Sérologie EBV ^S , Sérologies Hépatites A ^S (IgG et IgM) et B ^S (Ac anti-HBs, Ac anti-HBc IgM et Ac anti-HBc totaux), T3L, T4L, Testostérone (homme), Toxoplasmose ^S , Transferrine, TSH, Vitamine B12, Vitamine D Bilan hormonal : FSH, LH, Oestradiol, Progestérone, Prolactine Médicaments : Acide Valproïque (Dépakine), Alcoolémie, Amikacine, Carbamazépine (Tégréto), Ethanol, Gentamicine, Lithium, Paracétamol, Phénobarbital, Phénytoïne, Théophylline, Tobramycine, Vancomycine		
 Réf 368884	T-SPOT (3 tubes)	 Réf 366164	Folates érythrocytaires
 Réf 368967	ASK, ASLO, BW (VDRL) ^S , CDT, Electrophorèse des protéines (+ 1 tube en l'absence de Biochimie – Immuno-enzymologie), Immuno-fixation des protéines (+ 1 tube en l'absence de Biochimie – Immuno-enzymologie), Latex Waaler-Rose, MNI, Maladie de LYME ^S , Sérologie H. pylori ^S , Sérologies Chlamydiae trachomatis ^S et Mycoplasmes urogénitaux ^S		
 Réf 368967	Ac anti-peptides citrullinés (CCP), IgA anti-transglutaminases, Coqueluche (IgG) ^S , Delta 4 Androstènedione, Herpès (IgG+IgM) ^S , IgE spécifiques, Mycoplasme Pneumoniae (IgG+IgM) ^S , Parvovirus B19 (IgG+IgM) ^S , Phadiatop, Rougeole (IgG+IgM) ^S , Syndrome des anti-phospholipides (IgM anti-GPI + IgM anti-cardiolipines + IgG anti-cardiolipines), TRAK assay		
 Réf 368967	Anticorps anti-cellule pariétales de l'estomac, Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA), Anticorps anti-cytosol, Anticorps anti-endomysium IgA, Anticorps anti-LKM endoplasmique, Anticorps anti-membrane basale superficielle (Pemphigoïde bulleuse), Anticorps anti-mitochondrie M2, Anticorps anti-muscle lisse, Anticorps anti-ribosome		
 Réf 368967	Anticorps anti-DNA natif, Anticorps anti-ENA (Antigènes nucléaires solubles : AcSSA, AcSSB, AcSM, AcRNP, ACSCl, AcJO), Anticorps anti-histones, Anticorps anti-MPO, Anticorps anti-nucléaires, Anticorps anti-protéinase 3		

Le pictogramme indique qu'un tube à gel (bouchon - Réf. 368965) doit être prélevé en complément pour la sérothèque.
A noter qu'un seul tube par dossier suffit.