



## 1. OBJET

Cette fiche d'instruction est destinée aux préleveurs des laboratoires de ville. Elle présente les tubes à utiliser en fonction des analyses demandées. Elle s'applique à l'ensemble des prélèvements sanguins réalisés sous la responsabilité du laboratoire, sur site, à domicile ou en établissement de soins.

## 2. DOMAINE D'APPLICATION ET RESPONSABILITÉS

Les prélèvements sont réalisés sous la responsabilité du biologiste et sont pratiqués par le personnel autorisé.

## 3. RÉFÉRENCES

- Fiches techniques des réactifs
- Catalogue produit BD Vacutainer
- Base documentaire Tubes BD Vacutainer : « EDTA en PET », « Glucose », « Citrate de Sodium en PET » et « SST II Advance »


## 4. MÉTHODOLOGIE

Le tableau ci-après précise le nombre et le type de tubes nécessaires à chaque analyse.

Lorsque le paramètre n'y figure pas, se référer au guide du laboratoire spécialisé. Si le prélèvement demandé est un sérum, prélever deux tubes à gel séparateur (bouchon ■) : le premier pour l'analyse et le second, en complément pour la sérothèque.

## 5. CLASSEMENT ET ARCHIVAGE DES ENREGISTREMENTS ASSOCIÉS

Se référer à la procédure [MU-QUAL-PRG004 « Maîtrise des enregistrements relatifs à la qualité »](#).

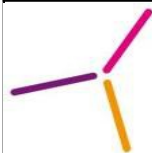

**RAPPEL : Ordre de prélèvement des tubes**



 Réf 368861	NFS, Plaquettes	 Réf 368861	Electrophorèse de l'hémoglobine, HBA1C, Réticulocytes, VS
 Réf 368967	<b>Biochimie – Immuno-enzymologie :</b> Acide urique, ALAT (SGPT), Albuminémie, Amylase, ASAT (SGOT), BHCG, Bilan lipidique, Bilirubine, Calcium, Chlore, Cholestérol, CPK, Créatinine, CRP, Digoxine, Fer, GGT, Glycémie ( <i>domiciles et établissements de soins dont le délai avant centrifugation est inférieur à 2h</i> ), HIV <sup>S</sup> , Hépatite B <sup>S</sup> (Ag HBs), Hépatite C <sup>S</sup> , Ionogramme, LDH, Lipase, Magnésium, PAL, Phosphore, Potassium, Protides, Réserve alcaline, Sodium, Transaminases, Triglycérides, Urée		
 Réf 368921	Glycémie ( <i>domiciles et établissements de soins dont le délai avant centrifugation est supérieur à 2h</i> ), Lactates	 Réf 367374	Ammoniémie
 Réf 366164	BNP, Troponine Ic	 Réf 366164	Myoglobine, PTH
 Grand tube Réf 367864	Groupe sanguin ( <i>carte de groupe avec double-détermination = deux prélèvements différents</i> ), RAI (Agglutinines irrégulières)	 Réf 363048	Antithrombine III, Facteurs de coagulation (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII) <b>A remplir impérativement jusqu'au trait</b>
<i>Si la prescription comporte des analyses à prélever sur tube  réf. 363048 et sur tube  CTAD, prélever uniquement le CTAD.</i>			
 Réf 363048	D-Dimères, Fibrine, TCA ( <i>en absence de traitement hépariné</i> ), TCK, TP <b>A remplir impérativement jusqu'au trait</b>	 CTAD Réf 367562	<i>En présence de traitement hépariné :</i> Anti-Xa, TCA <b>A remplir impérativement jusqu'au trait</b>
<i>Si la prescription comporte des analyses à prélever sur tube  et sur tube , prélever uniquement le tube .</i>			
 Grand tube Réf 367955	<b>Urgence : Croix sur le bouchon et étiquette stabilotée</b> Ac anti-péroxydases, Ac anti-thyroglobuline, ACE <sup>S</sup> , AFP <sup>S</sup> , Apo A, Apo B, Bêta2-microglobuline, BW (TPHA) <sup>S</sup> , CA 125 <sup>S</sup> , CA 15-3 <sup>S</sup> , CA 19-9 <sup>S</sup> , Cortisol, S-DHEA, Facteur rhumatoïde, Ferritine, Folates sériques, Fructosamine, Haptoglobine, IgA, IgG, IgM, Préalbumine, PSA L <sup>S</sup> , PSA <sup>S</sup> , Rubéole <sup>S</sup> , Sérologie CMV <sup>S</sup> , Sérologie EBV <sup>S</sup> , Sérologies Hépatites A <sup>S</sup> (IgG et IgM) et B <sup>S</sup> (Ac anti-HBs, Ac anti-HBc IgM et Ac anti-HBc totaux), T3L, T4L, Testostérone (homme), Toxoplasmose <sup>S</sup> , Transferrine, TSH, Vitamine B12, Vitamine D		
 Grand tube Réf 366881	<b>Bilan hormonal :</b> FSH, LH, Oestradiol, Progestérone, Prolactine <b>Médicaments :</b> Acide Valproïque (Dépakine), Alcoolémie, Amikacine, Carbamazépine (Tégrétol), Ethanol, Gentamicine, Lithium, Paracétamol, Phénobarbital, Phénytoïne, Théophylline, Tobramycine, Vancomycine		
 Réf 368884	T-SPOT (3 tubes)	 Réf 366164	Folates érythrocytaires
 Réf 368967	CTX (Cross laps), 17-OH-Progestérone <b>Tube à centrifuger et congeler</b>	 Réf 368967	ASK, ASLO, BW (VDRL) <sup>S</sup> , CDT, Electrophorèse des protéines (+ 1 tube ) , Immuno-fixation des protéines (+ 1 tube ) , Latex Waaler-Rose, MNI, Maladie de LYME <sup>S</sup> , Sérologie H. pylori <sup>S</sup> , Sérologies Chlamydiae trachomatis <sup>S</sup> et Mycoplasmes urogénitaux <sup>S</sup>
 Réf 368967	Ac anti-peptides citrullinés (CCP), IgA anti-transglutaminases, Coqueluche (IgG) <sup>S</sup> , Delta 4 Androstènedione, Herpès (IgG+IgM) <sup>S</sup> , IgE spécifiques, IgE totales, Mycoplasme Pneumoniae (IgG+IgM) <sup>S</sup> , Parvovirus B19 (IgG+IgM) <sup>S</sup> , Phadiatop, Rougeole (IgG+IgM) <sup>S</sup> , Syndrome des anti-phospholipides (IgM anti-GPI + IgM anti-cardiolipines + IgG anti-cardiolipines), TRAK assay		
 Réf 368967	Anticorps anti-cellule pariétales de l'estomac, Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA), Anticorps anti-cytosol, Anticorps anti-endomysium IgA, Anticorps anti-LKM endoplasmique, Anticorps anti-membrane basale superficiel (Pemphigoïde bulleuse), Anticorps anti-mitochondrie M2, Anticorps anti-muscle lisse, Anticorps anti-ribosome		
 Réf 368967	Anticorps anti-DNA natif, Anticorps anti-ENA (Antigènes nucléaires solubles : AcSSA, AcSSB, AcSM, AcRNP, ACSCl, AcJO), Anticorps anti-histones, Anticorps anti-MPO, Anticorps anti-nucléaires, Anticorps anti-protéinase 3		

Le pictogramme indique qu'un tube à gel (bouchon - Réf. 368965) doit être **prélevé en complément pour la sérothèque**.  
A noter qu'un seul tube par dossier suffit.